

Sådan monteres og demonteres Flexoduct® Kildefilter og slangeovertræk

Her vises trin for trin, hvorledes man udskifter Flexoduct® Kildefilter og slangeovertræk i steril udførelse. Inden udskiftning påbegyndes skal der kontrolleres, at ventilationsanlægget er slukket.



Kildefilter og slangeovertræk pakkes ud og lægges på det sterile bord.



Tag slangeovertrækket og hold det fast under armen. OBS! For at lette processen kan du lave dit eget omslagsfold. Tag evt. den medfølgende elastik om håndledet.



Skub overtrækket op over punktsuget. OBS! Lad overtrækket slutte ca. 25 cm. udenfor punktsugets åbning. Fastgør overtrækket øverst med den medfølgende dobbelttape.



Ved hjælp af de fire tapper, klikkes Flexoduct® Kildefilter på sugehovedet...



...igennem åbningen af slangeovertrækket.



Slangeovertrækket samles om kildefilterets tilspidsede del med elastikken og dobbelttapen. Nu er punktsuget med Flexoduct® Kildefilter klar til brug.



Ved demontering trækkes slangeovertrækket tilbage over kildefilteret.



Kildefilteret løsnes af punktsuget, pakkes sammen med overtrækket og bortskaffes som almindeligt sygehusaffald.

JRV A/S

Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve, Danmark · Tlf. (+45) 43 950 950 · Fax (+45) 43 950 951
 www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: DK 26208742 · Bankforbindelse: Sydbank konto:
 6818 1007631 · BIC/SWIFT: SYBKDK22 · IBAN-nr.: DK6668180001007631
 Medlem af: Dansk Industri · Teknik · Foreningen af Ventilationsfirmaer